

SenSura® Convex

Forte contra o vazamento, suave com a pele

SenSura® Convex light é indicada para redução de vazamentos em diferentes perfis corporais: **Regular**, **Irregular** e **Abaulado** com estomas que necessitam de suporte para o aumento da protrusão.

Plano ou convexo?

Para garantir um ajuste adequado, lembre-se de que todo corpo é único e possui necessidades diferentes.

A indicação do tipo de base adesiva deve considerar não apenas a protrusão do estoma, mas também o perfil corporal periestomal.

Nesse contexto, bases adesivas convexas possuem indicações para a maioria das pessoas com estomias.




Indicando soluções em estomias baseadas em necessidades individuais

O RIO é baseado na Terminologia do Perfil Corporal validada por consenso internacional com mais de 2.000 enfermeiros de 27 países diferentes. Essa abordagem estruturada facilita a tomada de decisão sobre a solução perfeita para cada necessidade com SenSura®.

Reduzir o risco de vazamento, começa com uma pergunta: **regular**, **irregular (inward)** ou **abaulado (outward)**?

A avaliação da área periestomal da pessoa com estomia é fundamental na prevenção de complicações decorrentes do vazamento, pois permitirá a identificação do perfil corporal: um parâmetro indispensável para a indicação da solução adequada.

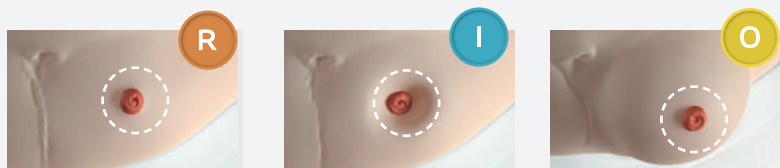

A dupla proteção de SenSura®

SenSura® possui dupla camada adesiva e promove dupla proteção.


A camada de cuidado absorve o excesso de umidade da pele enquanto a camada de proteção evita a erosão do adesivo

1. Camada de cuidado } Juntas, as duas camadas se tornam uma, o adesivo SenSura®.

2. Camada de Proteção }

3. Bolsa coletora

4. Filtro
Reduz o risco de acúmulo de gases e neutraliza o odor.

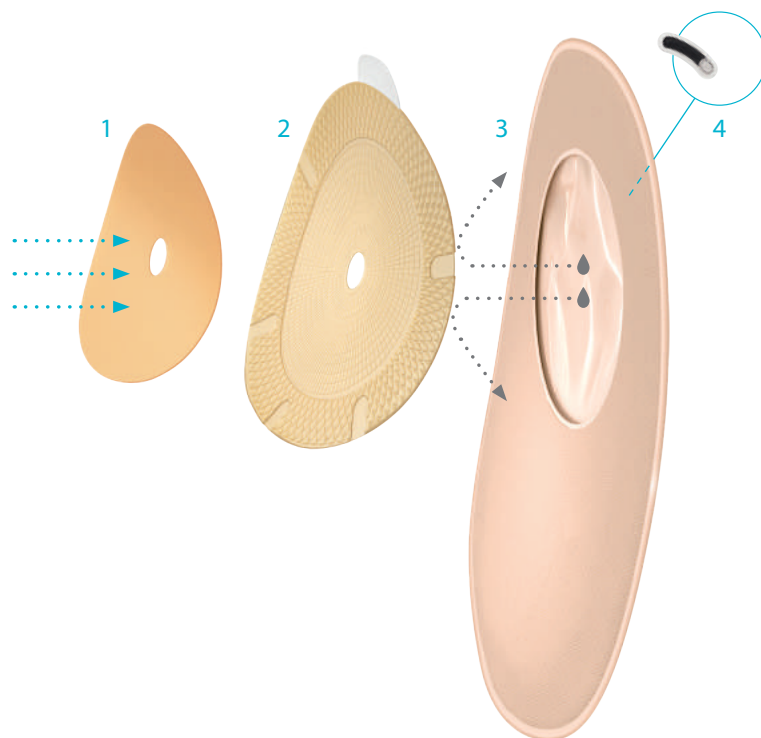

Solução SenSura®

A ampla variedade da linha SenSura® atende os diferentes perfis corporais e estilos de vida.



SenSura® 1 peça com base adesiva plana e convex light



SenSura® Click 2 peças com base adesiva plana e convex light



O programa Coloplast Ativa acompanha você!

Como o usuário pode se cadastrar no programa?

Coloplast®
Ativa
Seu paciente,
nosso cuidado.



0800 285 8687



coloplastativa.com.br



ativa@coloplast.com



O programa Coloplast Ativa é destinado a novos usuários com necessidades íntimas de saúde.

Consulte a nossa central de atendimento para mais informações e cidades contempladas no programa.

* Como um equipamento combinado a efeito de estudo

1. Aaes H. 2011. The Dialogue Study – SenSura leakage performance and the effect on peristomal skin conditions, data-on-file

2. Davis, J 2011. Association between leakage and QoL: Factors impairing quality of life for people with an ostomy Gastrointestinal Nursing 9 (2 Suppl):14-18

Coloplast A/S, Hølstedvej 1, 3050 Humlebaek, Dinamarca

www.coloplast.com O logotipo Coloplast é marca registrada da Coloplast A/S. © [2020-04]. Todos os direitos reservados Coloplast A/S.

Uma vida melhor

Ostomy Care, Continence Care, Wound & Skin Care and Interventional Urology

 **Coloplast**