

## Guia de soluções para estomias baseado nas necessidades individuais do usuário

Reduzir o risco de vazamentos começa com uma pergunta:  
Regular, Irregular ou Abaulado?



## ***Aumente a sensação de segurança de seus pacientes desde o início.***

Pessoas tem perfis corporais e área periestoma diversas, com diferentes necessidades, que requerem soluções individualizadas. Nós acreditamos que a chave para a redução dos vazamentos e na promoção da sensação de segurança se iniciam com a solução das necessidades individuais em estomias.<sup>1</sup> Diante deste cenário, os usuários também precisam estar alertas a respeito da importância de uma rotina apropriada de trocas de equipamentos coletores. O objetivo deste guia é oferecer uma abordagem sistematizada e estruturada de avaliação e recomendação de soluções personalizadas, proporcionando um ajuste seguro, independente do perfil corporal do usuário.

O RIO é baseado na Terminologia do Perfil Corporal que foi desenvolvida por um painel de experientes enfermeiros

**76%**

das pessoas com estomias vivenciaram ao menos um episódio de vazamento nos últimos 6 meses<sup>2</sup>.



estomaterapeutas de todo o mundo.

A abordagem estruturada promove uma tomada de decisão mais fácil e assertiva na indicação de soluções em estomias.



## ***Comece identificando o perfil corporal do paciente***


Durante a avaliação do perfil corporal, sempre considere as posições corporais mais desafiadoras e que podem afetar o ajuste entre a base adesiva e a pele. Escolha o perfil corporal que mais se pareça com seu paciente, os três tipos de perfil corporal estão descritos ao lado.

### ***– Identifique a localização da abertura do estoma***

Uma vez que você identificou o perfil corporal, procure a página que faça referência ao perfil corporal do seu paciente, Regular (pg. 6), Irregular (pg. 8) e Abaulado (pg. 10) para então identificar a posição da abertura do estoma, se está acima, no nível ou abaixo do nível da pele. Você pode se guiar pelo esquema de cores, Regular é identificado pela cor laranja, Irregular pela cor azul e Abaulado, amarelo.

Por favor, note: Você deve sempre manter as considerações gerais a respeito das necessidades de uma pessoa com estomia, como a consistência do efluente, condições da pele e saúde geral.


R

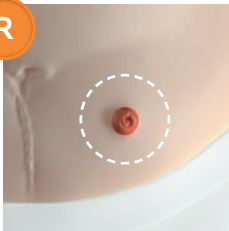

### Perfil Corporal Regular

A área periestoma é nivelada com o abdômen, mas a superfície da pele pode ser desnivelada.


I

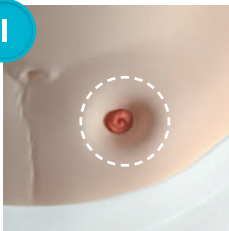

### Perfil Corporal Irregular

A área periestoma é irregular e cria uma depressão ao redor do estoma.

O

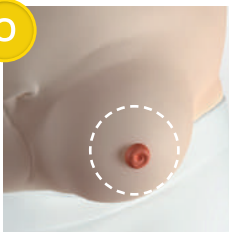

### Perfil Corporal Abaulado

A área periestoma emerge acima do abdômen formando um abaulamento.

## Qual a posição da abertura do estoma?

### Acima da superfície da pele

Com poucos ou nenhum desafio



### Acima da superfície da pele

Com a necessidade de adjuvantes para prevenir vazamentos.



### No nível da pele

O estoma precisa de suporte para ficar protruso



### Abaixo da superfície da pele

O estoma precisa de suporte extra para ficar protruso





SenSura® (plana)



SenSura® (plana)  
Brava® Anel Moldável



SenSura® Convex Light  
Brava® Cinto, Brava® Anel Moldável



Alternã® Convexa profunda  
Brava® Cinto, Brava® Anel Moldável

## Qual a posição da abertura do estoma?

Acima da superfície da pele



No nível da pele

O estoma precisa de suporte para ficar protruso



Abaixo do nível da pele

O estoma precisa de suporte extra para ficar protruso







SenSura® (plana)  
Brava® Anel Moldável



SenSura® Convex light  
Brava® Anel Moldável



Alterna® Convexa profunda  
Brava® Cinto, Brava® Anel Moldável

## Qual a posição da abertura do estoma?

Acima do nível da pele



No nível da pele

O estoma precisa de suporte para ficar protruso



Abaixo do nível da pele

O estoma precisa de suporte extra para ficar protruso





SenSura® (plana)  
Brava® Fita Adesiva Elástica



SenSura® (plana)  
Brava® Anel Moldável  
Brava® Fita Adesiva Elástica



SenSura® Convex Light  
Brava® Anel Moldável  
Brava® Fita Adesiva Elástica

## Ajudando os usuários a superarem todos os desafios com a linha de adjuvantes **Brava**<sup>®</sup>

A linha de Adjuvantes Brava<sup>®</sup> foi desenvolvida para lidar com desafios recorrentes na vida de uma pessoa com estomia, como irritação da pele ou no ajuste mais seguro do equipamento à área periestoma.

Todos os produtos da linha são projetados para facilitar o uso e podem ser usados com qualquer marca de equipamento de estomia.

### ***Linha de Adjuvantes Brava<sup>®</sup> para estomias***

Para um ajuste personalizado na solução de necessidades individuais como vazamento, irritação de pele e melhor qualidade de vida.



**Brava**<sup>®</sup>



## **Brava® Anel Moldável**

*Flexível e durável*

### ***Menos risco de vazamento com o melhor ajuste***

As situações mais comuns que levam ao vazamento podem ser evitadas com o uso do Brava® Anel Moldável. Ele promove um ótimo ajuste entre o equipamento coletor e a área periestoma, prevenindo que o efluente penetre por debaixo da base adesiva. Assim como mantém uma vedação segura ao redor do estoma, sendo altamente resistente à erosão.



## **Brava® Removedor de Adesivo**

*Remoção rápida e fácil de adesivos*

### ***O removedor de adesivo que faz a diferença***


Brava® Removedor de adesivo diminui o risco de trauma mecânico na pele, permitindo que você e seus pacientes removam adesivos de maneira fácil e rápida, sem desconforto e sem deixar resíduos – não compromete a adesividade do equipamento que será aplicado posteriormente.



## **Brava® Spray e Lenço Barreira** *O amigo invisível para a pele*

### **Protege contra vazamentos e adesivos**

Vazamentos e adesivos podem causar diversos danos na pele. Brava® Spray e Lenço Barreira cria uma camada “respirável” sobre a pele, protegendo contra danos potenciais e ainda não interfere na aderência dos equipamentos coletores que serão usados na próxima troca. Brava® Spray e Lenço Barreira é um produto à base de silicone, então não causa ardor ao ser aplicado.

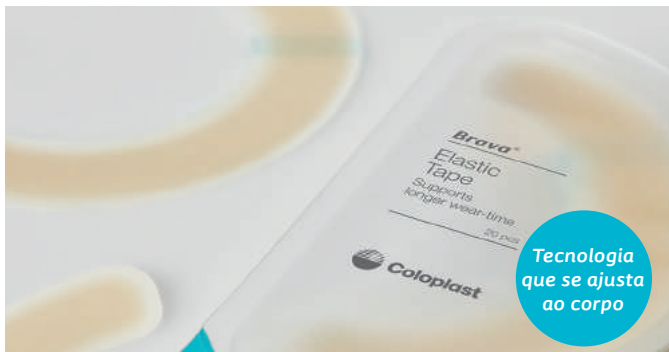

## **Brava® Fita Adesiva Elástica**

*Ajuste e segurança para todos os perfis corporais*

### ***Promove segurança extra mantendo o equipamento de estomia mais estável***

Pregas cutâneas, flacidez e umidade da pele prejudicam a estabilidade do adesivo do equipamento de estomia. Ao acompanhar o formato e o movimento do corpo, Brava® Fita Adesiva Elástica mantém o adesivo mais seguro, prevenindo que as bordas se soltem ou se enrolem.





Redução  
de  
Odor

## **Brava® Desodorante Lubrificante** Efeito multi-lubrificante

### ***Desodorante e lubrificante em um só produto***

O odor proveniente do efluente, ou a aderência do efluente na face interna da bolsa coletora são desafios importantes para algumas pessoas que vivem com um estoma. Especialmente desenvolvido para ser utilizado dentro da bolsa coletora, o Brava® Desodorante Lubrificante mascara o odor durante as trocas dos equipamentos, enquanto o efeito do multi-lubrificante facilita no esvaziamento da bolsa coletora.



Amigável  
a pele

## **Brava® Placa Protetora**

*Uma camada extra de proteção*

### ***Gentil com a pele periestoma***

Pacientes com problemas de pele são mais vulneráveis à maceração e ao desconforto. Brava® Placa Protetora deve ser utilizada diretamente sobre a pele e por debaixo da base adesiva do equipamento coletor, promovendo uma camada extra de absorção e proteção contra ação dos efluentes.



Pasta sem  
álcool

## **Brava® Pasta sem álcool**

*Amigável a pele e resistente*

### ***Nivelamento seguro das irregularidades da pele***

Mesmo que seus pacientes apresentem pregas ou grandes dobras cutâneas, Brava® Pasta sem álcool pode ajudar, preenchendo as dobras e contornos da pele, fazendo com que você e seus pacientes estejam no controle dos riscos de vazamento. Brava® Pasta não contém álcool e não causa ardor ou coceira quando aplicada na pele.



Protege e  
trata  
pele  
periestoma

## **Brava® Pó**

*Absorve a umidade e reduz a irritação local*

### ***Previne que a umidade cause mais danos à pele***

Além de causar desconforto, a umidade afeta na aderência do adesivo do equipamento coletor. Desta forma Brava® Pó seca e trata a superfície da pele que apresenta dermatite úmida, auxiliando na prevenção de novos episódios de vazamento e danos potenciais à pele.




## **Brava® Creme Barreira**

*O tratamento gentil para pele ressecada ou irritada*

### **Hidrata e permite a aderência de adesivos**

Brava® Creme Barreira tem um efeito hidratante que auxilia na proteção e recuperação da pele contra os efeitos do contato do efluente e do adesivo. Brava® Creme Barreira cria uma película de proteção duradoura na pele, que garante uma boa aderência da base adesiva.



Promove  
sensação de  
segurança

## **Brava® Cinto**

*Garante um melhor ajuste do equipamento coletor - e mais liberdade*

### ***A maneira segura de um melhor ajuste***

Brava® cinto oferece segurança extra de maneira discreta, ajudando a manter o equipamento coletor no lugar.

Feito de material macio e confortável, Brava® Cinto vem nos tamanhos padrão e XL, que são ajustáveis para diferentes perfis abdominais.



## A vida é mais confortável com a **rotina adequada de troca de equipamentos**

Ter uma solução personalizada em estomia é fundamental o cuidado da saúde da pele periestoma.<sup>3</sup> Estabelecer bons hábitos de troca de equipamentos também auxilia na manutenção da saúde da pele e qualidade de vida.

Tudo se resume em um principal conceito, estabelecer a rotina individualizada e adequada de frequência de troca e autoavaliação para cada pessoa com estoma, promovendo segurança e liberdade.

A durabilidade dos equipamentos varia de pessoa para pessoa e também pode ser influenciada por fatores como uso de medicamentos, ganho de peso entre outros, tornando a reavaliação rotineira importante para a prevenção de complicações na pele.

## Programa Ativa: Seu paciente, nosso cuidado



O programa **Coloplast Ativa** acompanha você!



0800 285 8687



[coloplastativa.com.br](http://coloplastativa.com.br)



[loja.coloplast.com.br](http://loja.coloplast.com.br)



### Redes sociais

Estomia



Continência



Institucional

